


Pantone 5415

Hergestellt von:



optimummedical®

Vertrieb in Deutschland:

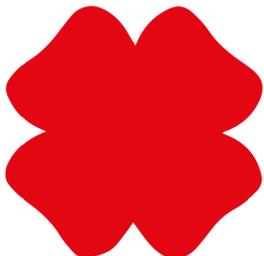



AUROSAN

Optimum Medical Solutions Ltd
Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds,
LS2 9ET, United Kingdom,
Tel.: +44 (0) 8456 435 479
enquiries@optimummedical.co.uk
www.optimummedical.co.uk



Ugo fix™
gentle catheter clip

REF 3004

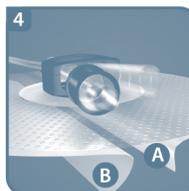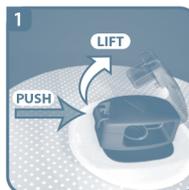

Ugo Fix Gentle – Katheter-Clip

Bei **Optimum Medical** verstehen wir die Notwendigkeit für eine sichere und zuverlässige Katheterfixierung. Wir haben den **Ugo Fix Gentle** entwickelt, um eine bequeme Fixierung zu bieten, was dem Patienten das notwendige Selbstvertrauen gibt, um sich frei zu bewegen. Der **Ugo Fix Gentle** bietet Fixierung von 2-Wege-Dauerblasenkathetern an der Bifurkation des Katheters. Er ermöglicht die Fixierung der Harnröhre oder suprapubischen Katheter, die an den Katheterventilen oder Drainagebeuteln befestigt sind. Der **Ugo Fix Gentle** kommt in Einheitsgröße, um zu allen 2-Wege-Dauerkatheter-Größen und -Materialien zu passen.

VORTEILE DER VERWENDUNG DES UGO FIX GENTLE

Der **Ugo Fix Gentle** verringert das Risiko von Verletzungen und Schmerzen, die durch das Ziehen oder wiederholte Reiben des Katheters auf den Blasen Hals und die Harnröhre verursacht werden. Jeder **Ugo Fix Gentle** kann für bis zu 7 Tage verwendet werden. Nur eher austauschen, wenn er beschädigt oder verschmutzt ist. Sie können sich beim Tragen des **Ugo Fix Gentle** duschen.

Drehclip

- Mit der Drehclip-Bewegung kann sich der Katheter in natürlichen Einklang mit dem Körper bewegen
- Erhöhter Pfeil oben auf dem Clip, um Richtung der Kathetereinführung anzuzeigen
- Interne Silikonklebe bietet Halt auf Katheteroberfläche
- Hält Katheter von der Haut fern, um Hautmarkierungen zu vermeiden

Weiche, wieder anklebbare Silikon-Gelkissen

- Atraumatische Entfernung ohne Verwendung von Lösungen, um Klebstoff zu lösen
- Keine klebrigen Rückstände
- Entspricht alle Hauttypen dank mehrerer Berührungspunkte
- Kann mehrfach auf dieselbe Hautstelle aufgetragen werden
- Wieder anklebbare Klebefläche ermöglicht eine einfache Repositionierung
- Keine komplexe Hautvorbereitung erforderlich

GEBRAUCHSANWEISUNG

Es ist wichtig, dass der Katheter im **Ugo Fix Gentle** vor dem Auftragen auf die Haut befestigt ist.

VOR DEM AUFTRAGEN AUF DIE HAUT

Hinweis: Der **Ugo Fix Gentle** wurde konzipiert, um den Katheter zu fixieren und zu sichern. Wenn der Katheter an einem Urinbeutel befestigt ist, ist es ratsam, eine zusätzliche Stütze für das Gewicht des Urinbeutels zu verwenden.

- | | | |
|--|--|--|
| 1 ÖFFNEN SIE DEN CLIP | 2 KATHETER EINLEGEN | 3 ABDECKUNG SCHLIESSEN |
| • Drücken und heben Sie den Haken an, um die Abdeckung des Ugo Fix Gentle zu öffnen | • Legen Sie das Bifurkationsteil des Katheters in den Ugo Fix Gentle (kann nur auf eine Weise eingelegt werden) | • Wenn er fertig eingelegt ist, schließen Sie die Abdeckung des Ugo Fix Gentle durch leichtes Herunterdrücken |
| • Sie werden ein Klicken vernehmen | | • Sie werden ein Klicken vernehmen |

AUFTRAGEN AUF DIE HAUT

- 4** Nun ist der Katheter im Clip befestigt und der **Ugo Fix Gentle** kann auf die Haut aufgetragen werden. Stellen Sie sicher, dass die Haut vor dem Auftragen sauber und trocken ist.
- Entfernen Sie die Folie (A) und tragen Sie ihn auf die Haut an der gewünschten Stelle auf
 - Entfernen Sie die Folie (B) und glätten Sie ihn
 - Schließlich stellen Sie sicher, dass der Katheter nicht gezogen wird, wenn Sie stehen und Sie in der Lage sind, sich bequem zu bewegen, ohne dass er verrutscht

WARNHINWEIS: Von Kindern fernhalten!

