

QUALITÄTSKONTROLLE FÜR DEN ANWENDER

Inokulieren Sie **EnteroPluri-Test** unter Verwendung der in Tabelle Nr. 3 angegebenen Referenzbakterienstämme.

Zur Inokulation, Bebrütung und Ablesung befolgen Sie bitte die Anweisungen des Abschnitts **TESTVERFAHREN**.

Tabelle Nr. 3:

Mikroorganismen	Glucose	Gas	Lysin	Ornithin	H ₂ S	Indol	Adonitol	Lactose	Arabinose	Sorbitol	VP	Dulcitol	PA	Urea	Citrat
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+	±	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	+	±	-	+	+	-	-	-	-	-	±	-	+	+	±
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	+	±	+	-	-	-	+	+	+	+	±	+	-	±	+
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	+	±	+	±	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	±
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * ATCC 27853	-	-	-	-	-	-	-	-	±	-	-	-	-	±	+

* *Pseudomonas aeruginosa* ist oxidase positiv und daher nicht im **Codeheft** des **EnteroPluri-Test** enthalten.

DIE ZU EINEM UNGÜLTIGEN ERGEBNIS FÜHREN KÖNNEN